



德国非凡自锁托槽 锁片打开与更换注意事项

- 1) BioQuick, BioPassive, Smile, QuicKlear等金属和陶瓷系列自锁托槽要求：使用专用打开工具C501-1842 从龈向往颌向推开锁片。
- 2) 用任何工具去翻转锁片是绝对禁止的，这是最常见的错误打开方式之一。另外，大力压迫锁片也是错误的操作动作。
- 3) 复诊时应当首先清洁口内，尤其是牙结石，再推开锁片。
- 4) 金属自锁BioQuick等与陶瓷自锁QuicKlear的锁片互不通用，因为形状不同。
- 5) 一旦锁片损坏，请先检查下自己的开启方法：我们要求从龈向往颌向推开锁片，具体详见操作光盘。

德国非凡FORESTADENT

北京泰克莱恩 技术部

2012年3月